


HEINE Li-ion mPack/ Li-ion mPack LL

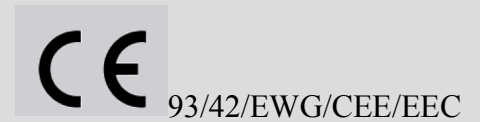

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany
Tel. +49 (0) 81 52 / 38 - 0
Fax +49 (0) 81 52 / 38 - 2 02
E-Mail: info@heine.com · www.heine.com
med 2305 1/3.13

Инструкции по применению:

Перед использованием аккумуляторные батареи HEINE Li-ion mPack/Li-ion mPack LL, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и держите её под руками для обращения к ней по мере необходимости.



В соответствии с местными постановлениями данный продукт должен быть утилизирован в качестве отдельного электронного устройства.

Назначение: аккумуляторные батареи HEINE Li-ion mPack/Li-ion mPack LL предназначены для использования только с источниками питания HEINE mPack and HEINE mPack LL.

Общие Меры Безопасности

В целях обеспечения эффективной и безопасной работы, пожалуйста, следуйте данным инструкциям:

- Не подвергайте воздействию огня
- Не опускайте коротких замыканий
- Не разбирайте и не модифицируйте прибор
- Не роняйте и не подвергайте воздействию чрезмерной вибрации
- Стерилизация, автоклавирование, газовая стерилизация и система стерилизации Sterrad строго запрещены
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей
- Храните в недоступном для детей месте
- Храните в прохладном и сухом месте

Внимание: утилизация использованных батареек должна производиться в соответствии с инструкциями.

Внимание: при замене батареек HEINE Li-ion mPack/Li-ion mPack LL батарейками другого типа вероятно возможность взрыва.

Безопасность в использовании:

Идеальная температура окружающей среды во время зарядки составляет от 10 ° C до 35 ° C. Запрещается заряжать аккумуляторные батареи Li-Ion MPACK / MPACK LL при температуре окружающей среды ниже 0 ° C. Это может нанести вред.

Установка

- Снимите зарядный штепсель с аккумуляторных батарей HEINE mPack или HEINE mPack LL.
- Отверните винт над клипом с помощью монетки или отвертки и снимите крышку.
- Аккумуляторные батареи Li-Ion MPACK / MPACK LL можно удалить после отсоединения шнура. Для этого не требуются никакие инструменты.
- Вставьте новую батарею так, чтобы была видна этикетка, а шнур был направлен по направлению к переднему управлению.
- Вставьте зарядный штепсель батареи в монтажную плату.
- Для того чтобы закрыть, вставьте два штифта на крышке в разъемы, расположенные в нижней части корпуса.
- Перед использованием подзарядите аккумуляторные батареи Li-Ion MPACK / MPACK LL в течение двух часов.

Спецификации

Условия окружающей среды: обычное использование: от +10 °C до +40 °C

Хранение: от +5 °C до +45 °C

Транспортировка: от -20 °C до +45 °C

Относительная влажность: от 10 % до 75 %

Давление воздуха: от 700 гПа до 1060 гПа

Напряжение: 7,2 VDC

Применимые Стандарты

UL 1642 (Общие требования безопасности для литий-ионных батарей)

ISO 7000 – 2004 (Графические символы для использования на оборудовании)

EN 980: 1996 (Графические символы для использования на оборудовании)