

Осветительная головка HEINE Slit

Примечание: Перед использованием осветительной головки HEINE Slit, внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней, по мере необходимости, держите её под руками.

Фирма производитель гарантирует безопасность, надежность и адекватность работы прибора только при условии выполнения всех параметров инструкции, представленных ниже.

Колпачки и воронки

- При установке многоцветных насадок и воронок необходимо проконтролировать полное сопоставление соединительной щели с соответствующей частью Bayonet крепления. После полной установки, прибор необходимо закрепить, повернув кольцо вправо.
- Одноразовые воронки устанавливаются через адаптер.

Увеличительная оптика

На головке устанавливаются линзы, имеющие приблизительное увеличение $\times 2.5$. Линзы могут использоваться со всеми типами многоцветных воронок и насадок, исключая 150 мм тубулярную воронку.

Замена лампочки

- Отсоедините головку рукоятки и выдерните лампочку. Постарайтесь действовать осторожно, не прикладывая излишней силы.
- При установке новой лампочки проследите, чтобы вольтаж, указанный на теле лампочки, соответствовал таковому для рукоятки или источника питания.
- Установите новую лампочку на прежнее место.

Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования фирменных ламп HEINE Optotechnik.

Очистка и стерилизация

- Головку инструмента разрешается подвергать стерилизации при температуре 120 °C только после того, как будут отсоединены линзы и лампочка.
- Многоцветные наконечники и воронки очищаются посредством кипячения или обработки в растворе дезинфектанта.
- Воронки входящие в состав набора Sanalos S могут быть простерилизованы при температуре 140 °C, а металлические воронки при температуре 170 °C.

Запасные части и аксессуары

HEINE XHL галогенная лампа 2.5 V	X-001.88.077
HEINE XHL галогенная лампа 3.5 V	X-002.88.078
Увеличительные линзы	G-000.21.209
Адаптер	G-000.21.302
С одноразовыми воронками	
Упаковка 1000 штук одноразовых воронок UniSpec	B-000.11.242
Диаметр 2.5 мм	
Диаметр 4 мм	B-000.11.241
Воронки, покрытые Sanalos S, длиной 40 мм	
Диаметр 2.2 мм	G-000.21.310
Диаметр 2.8 мм	G-000.21.311
Диаметр 3.5 мм	G-000.21.312
Диаметр 4.5 мм	G-000.21.313
Диаметр 5.5 мм	G-000.21.314
1 упаковка = 5 воронок	G-000.21.316
Воронки, покрытые металлом	
Длинной 57 мм., Диаметр 4 мм	G-000.21.330
Длинной 65 мм., Диаметр 6 мм	G-000.21.331
Длинной 90мм., Диаметр 7 мм.	G-000.21.332
Воронки, с металлической щелью	
Длинной 65 мм., Диаметр 6 мм	G-000.21.341
Длинной 90 мм., Диаметр 7 мм	G-000.21.342
Металлическая трубка, длиной 150 мм., диаметром 10 мм.	G-000.21.350
Металлические съемные воронки	G-000.21.360

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории России обращайтесь по следующим адресам:
